

Инструкция по применению.

У Вас в руках прибор, который может помочь изменить Вашу жизнь и жизнь людей, которые Вам дороги!

Как и любой электронный прибор, он требует бережного отношения и ухода. Электроника (любая) не любит мороз и сырость, погибает под прямыми солнечными лучами и от перегрева. Чтобы прибор работал долго и исправно, старайтесь его не ронять. Заряжайте регулярно и храните в сухом месте, при комнатной температуре.

Средний срок службы прибора (его комплектующих) не менее 50 лет. Аккумулятора не более 5-ти лет.

Для удобства обслуживания прибора на нем есть два световых индикатора, которые подскажут Вам, как у него дела:

Верхний индикатор [1] (над клавишей включения[2]) это Индикатор работы.

-Если он не горит это означает что прибор Выключен (спит) Это режим хранения и транспортировки прибора.

-Индикатор Горит постоянно (включён тумблер [2]) - аккумулятор прибора заряжен, сам прибор готов к работе.

-Во время работы индикатор периодически мигает - идёт передача данных на устройство. Прибор работает.

- При включении тумблера индикатор мигнёт несколько раз - это означает, что прибор пытается создать подключение по блютуз. Совершите подключение в своём устройстве, если не делали этого ранее.

*Некоторые устройства требуют нового подключения по блютуз при каждом запуске или перезагрузке операционной системы.

Индикатор заряда аккумулятора [3].(Расположен ближе к разъёму мини-USB [4])

-Индикатор Не горит - прибор не включён.

-Индикатор заряда Горит постоянно - Заряд идёт.

-Индикатор заряда Не горит (свечение стало тусклым) аккумулятор полностью заряжен.

-Индикатор Мигает быстро - питание подаётся на аккумулятор, но зарядки нет - нужно включить тумблер питания.

* Не оставляйте прибор на длительное время (более 8-ми часов) без присмотра подключённым к кабелю.

Важно!

-Если прибор не берет заряд.

-Индикаторы мигают не так как указано в этой инструкции.

-Прибор ощутимо нагревается.

-От прибора идёт неприятный технический запах или дым.

*Не пытайтесь его вскрыть или починить. Неисправный прибор нельзя эксплуатировать.

Обратитесь в службу поддержки и узнайте как заменить прибор на другой.

*Контакты датчиков прилегающие к коже человека, изготовлены из прошедших медицинский контроль и сертификацию стандартных измерительных контактов (хлорное железо), перед применение контакты следует дезинфицировать обычными средствами гигиены и дезинфекции.

В отдельных случаях: Открытые травмы, язвы на голове пациента, следы крови, выделения, сыпь - пациент должен использовать одноразовую шапочку или повязку бинта, под резинкой и пластиковыми частями прибора, во избежании переноса инфекции на прибор.

